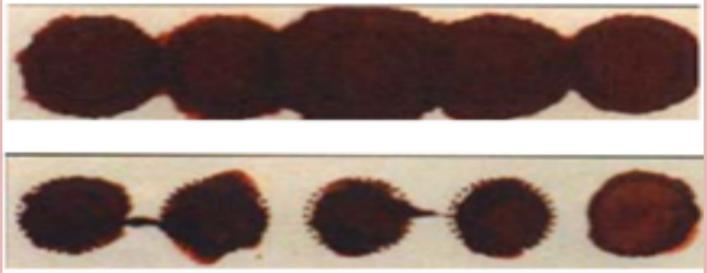
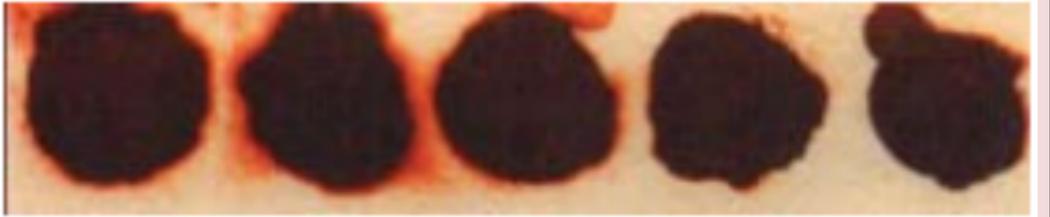


عينات دم غير مقبولة

شكل العينة والوصف	صورة
<p>عينة سليمة:</p> <p>اترك كمية كافية من الدم لتتقع من خلال ملء الدائرة المطبوعة مسبقاً على ورق الترشيح. ملء جميع الدوائر المطلوبة بالدم. لا تضع قطرات متتالية من الدم فوق بعضها أو مرة واحدة في الدائرة نفسها. تجنب لمس أو تلطيخ البقع.</p>	
<p>التشبع غير المتكافئ بحيث لم يظهر من الجهة الثانية:</p> <p>الأسباب المحتملة: إزالة ورقة الترشيح قبل أن يملأ الدم الدائرة أو قبل أن ينقع الدم إلى الجانب المعاكس؛ لمس ورق الترشيح بالأيدي مع القفاز أو بدونه أو مواد أخرى مثل محلول اليد أو مسحوق، إما قبل أو بعد جمع عينة الدم.</p>	
<p>وجود طبقات، تخثر، أو مشبعة أكثر من اللازم</p> <p>الأسباب المحتملة: لمس نفس الدائرة على ورقة الترشيح بقطرة الدم عدة مرات؛ ملء دائرة على جانبي ورقة الترشيح؛ تطبيق الدم الزائد.</p>	
<p>مخففة، غير مشبعة أو ملوثة</p> <p>الأسباب المحتملة: الضغط أو حلب المنطقة المحيطة بموقع الوخزة؛ والسماح لورقة أن تلمس الأيدي مع قفاز أو بدونه، أو مواد مثل الكحول، محلول مطهر، ماء، يد غسول، مسحوق، إلخ، إما قبل أو بعد جمع عينة؛ وتعريض البقع الدموية للحرارة؛ لمس بقع الدم للطاولة خلال تجفيف العينة.</p>	
<p>كمية غير كافية</p> <p>الأسباب المحتملة: إزالة ورقة الترشيح ملء الدائرة كلياً؛ عدم انتظار عدم إجراء الوخزة بطريقة تكون قطرة دم كبيرة بما فيه الكفاية صحيحة.</p>	